



- Nach ungefähr 8 Stunden Ladezeit leuchtet die Akku-LED grün
- Der Akku ist nun geladen
- Trennen Sie den Trafo von der Steckdose
- Trennen Sie den Trafo von der Batterie
- Stecken Sie das Batteriekabel unter den Sessel, um es zu schützen
- Ihr Sessel ist nun einsatzbereit →


#### 4. Anzeige für zu geringe Ladung




- Der Akku ist mit einer akustischen Alarmfunktion ausgestattet, der bei niedriger Ladespannung Alarmtöne aussendet.
- Dann bleiben Ihnen 15 Zyklen, um den Akku zu laden
- Laden Sie den Akku direkt auf
- Der Akku muss vollständig aufgeladen werden
- Benutzen Sie den Sessel niemals während dem Ladezyklus!

#### 6. Fehlerbehebung

Der Sessel hat keine Funktion • Laden Sie den Akku vollständig auf • Überprüfen Sie die Funktion des Sessels • Das Problem bleibt bestehen • Trennen Sie das Kabel vom Akku zum Sessel • Verbinden Sie das Kabel vom Sessel direkt mit dem Trafo • Verbinden Sie den Trafo mit einer Steckdose • Die grüne LED des Trafos leuchtet • Prüfen Sie die Funktion des Sessels im Netzbetrieb • Wenn der Sessel dann einwandfrei funktioniert, ist der Akku defekt

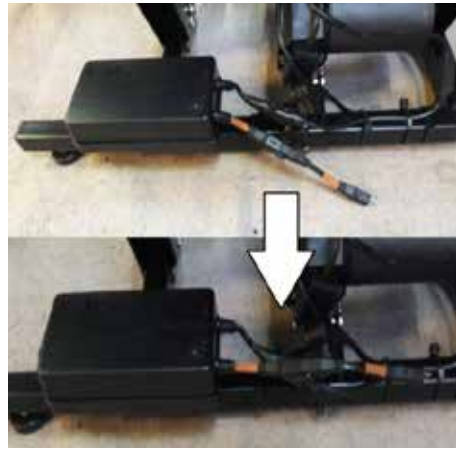

#### 5. Lagerung des Akkus

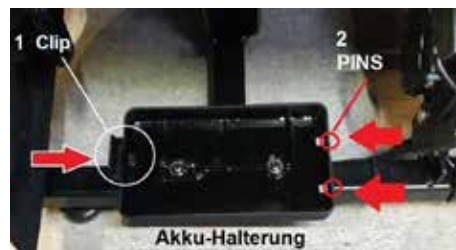

- Wenn Sie den Sessel mehr als 30 Tage nutzen, können Sie den Akku zur Lagerung aus dem Sessel zu entnehmen.
  - Laden Sie den Akku vollständig auf
  - Trennen Sie die 2 Kabel des Akkus
  - Heben Sie den Akku links an, nachdem Sie den Clip gedrückt haben
  - Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen +10 und +40 Grad Celcius und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 70% ( ohne Kondensation).
  - Laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate vollständig auf
- Zum Einsetzen des Akkus setzen Sie zuerst die 2 Pins in die 2 Leuchten der Halterung rechts ein und klicken ihn dann rechts im Clip ein. ↑

## Notice utilisation batterie réf. 1984

- Tenir hors de portée des enfants.
- Le branchement sur secteur 220 volts ne peut être effectué que par un adulte responsable capable de réaliser le branchement en toute sécurité.
- Pour la charge de la batterie, n'utilisez que le chargeur et le câble fourni d'origine.
- L'utilisation de tout autre chargeur endommagerait votre batterie et entraînerait la nullité de la garantie.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou d'intervenir sur la batterie car celle-ci contient des éléments chimiques. Seul le fabricant de cette batterie est habilité à intervenir.

**Il est impératif de ne pas utiliser le fauteuil lorsque le chargeur de la batterie est sur secteur, cela aurait pour effet d'abîmer les éléments de la batterie et de la rendre inutilisable.**

- Durant une longue période sans utilisation, la batterie va lentement se décharger et peut par conséquent se dégrader. C'est pourquoi, il est impératif d'effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les mois.
- Les batteries rechargeables, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et sont caractérisées par une perte progressive de capacité au fil du temps. L'usure normale et la perte de capacité continue présentée par la batterie ne sont pas couvertes par la garantie.

#### 1. Présentation de la batterie SEULE réf 1984



#### 2. Présentation de la batterie montée sur le fauteuil



#### 3. Charge de la batterie (NE PAS UTILISER LE FAUTEUIL PENDANT LA CHARGE)



- Brancher votre batterie au transformateur
- Brancher le transformateur sur une prise secteur
- La LED verte du transformateur s'allume
- La LED de la batterie s'allume en rouge

←



- Après une charge d'environ 8 heures, La LED de la batterie devient verte.
- La batterie est maintenant chargée
- Débrancher le transformateur de la prise secteur
- Débrancher le transformateur de la batterie
- Rentrer le câble de la batterie sous le fauteuil de façon à le protéger
- Vous pouvez maintenant utiliser votre fauteuil →


#### 4. Indication de charge faible



- la batterie est équipée d'une fonction « alarme sonore » qui indique la décharge en cas de tension faible. ↑
- Il vous reste une autonomie d'environ une quinzaine de cycles.
- Recharger votre batterie sans attendre
- Il est impératif d'effectuer une charge complète de la batterie
- Ne jamais utiliser le fauteuil pendant la charge de la batterie

#### 6. Dépannage

Le fauteuil ne fonctionne plus (plus aucune fonction) • Effectuer une charge complète de la batterie • Vérifier le fonctionnement du fauteuil  
 Le problème persiste • Débrancher le fil allant de la batterie au vérin du fauteuil • Brancher directement le fil du vérin sur le transformateur • Brancher le transformateur sur une prise secteur • La LED verte du transformateur s'allume • Vérifier le fonctionnement du fauteuil sur secteur • Si le fauteuil fonctionne, la batterie est donc défectueuse

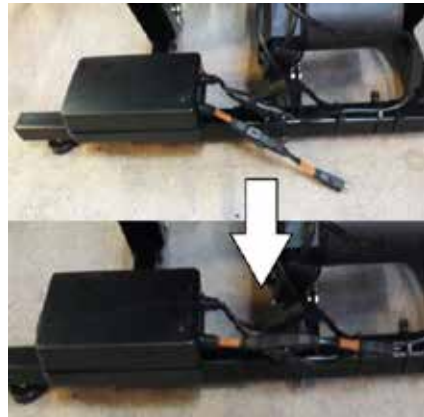

#### 5. Stockage de la batterie



- Si vous comptez ne pas utiliser la batterie pour une durée supérieure à 30 jours, celle-ci peut être retirée de son support pour être stockée.
  - Effectuer une recharge complète de la batterie
  - Débrancher les 2 fils sur la batterie
  - Soulever la batterie à gauche, après avoir écarté le clip
  - Stocker la batterie à une température comprise entre 10 et 40°C.
  - et une humidité entre 20 et 70 % (sans condensation).
  - Effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les mois
- Pour la remise en place, d'abord introduire les 2 ergots côté droit du support dans les 2 encoches de la batterie sous les fils, puis reclipser à gauche. ↑

**NE PAS JETER  
À LA POUBELLE STANDARD**



# Bedienungsanleitung für Nachrüst-Lithium Akku

## Artikelnummer 1984




- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Der 220-Volt-Netzanschluss kann nur von einem verantwortlichen Erwachsenen durchgeführt werden, der die Verbindung sicher herstellen kann.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das Original-Ladegerät und das Originalkabel.
- Die Verwendung eines anderen Ladegeräts führt zu Schäden am Akku und zum Erlöschen der Garantie.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu öffnen oder daran zu arbeiten, da diese chemische Elemente enthält. Nur der Hersteller dieser Batterie kann hier eingreifen.

**Es ist untersagt, den Sessel während des Ladevorgangs zu nutzen. Dies würde den Akku beschädigen und unbrauchbar machen.**

- Sollten Sie den Sessel längere Zeit nicht nutzen, entlädt sich der Akku langsam. Bitte laden Sie diesen mindestens 1 Mal im Monat vollständig auf.
- Wiederaufladbare Batterien haben naturgemäß eine begrenzte Lebensdauer und zeichnen sich durch einen fortschreitenden Leistungsverlust aus. Normaler Verschleiß und Dauerstromverlust der Batterie sind von der Garantie ausgeschlossen.

### 1. Darstellung Lithium-Akku Bestellnummer 1984

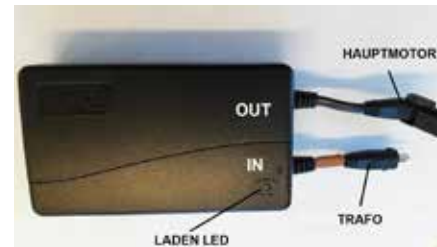

### 2. Montage am Sessel



### 3. Laden der Batterie

(NUTZEN SIE DEN SESSEL NICHT WÄHREND DES LADEVORGANGES!)



- Verbinden Sie den Akku mit dem Trafo
- Verbinden Sie den Trafo mit der Steckdose
- Die grüne LED des Trafos leuchtet
- Die rote LED des Akkus leuchtet

